



Detail produktu

Corega Pro Cleanser Orthodontics čistící tablety, 30 ks

Ničí 99,99% bakterií způsobujících zápach z úst (v laboratorních testech). Vaše ortodontická pomůcka potřebuje speciální péči. Corega Pro Cleanser Orthodontics s Crystal Clear Technology jemné a neabrazivní složení ničí bakterie, pomáhá odstraňovat skvrny a nežádoucí zabarvení, a tím pomáhá udržovat vaši pomůcku čistou.

Proč používat čistící tablety? Jedinečné složení přípravku Corega Pro Cleanser Orthodontics s Crystal Clear Technology pomůže udržet Vaši ortodontickou pomůcku čistou a průhlednou. Můžete se tak smát s jistotou.

Důležitou součástí zdravých úst je udržování Vašich ortodontických pomůcek v čistotě. Používejte čistící tablety Corega Pro Cleanser Orthodontics každý den a získáte tak jistotu, že Vaše ortodontická pomůcka bude čistá a svěží.

Testováno na většině těchto snímácích ortodontických pomůcek:

- rovnátka
- neviditelná rovnátka
- snímací udržovací rovnátka
- sportovní chrániče
- běžné ústní chrániče
- noční chrániče

Návod k použití:

1. Vložte jednu tabletu Corega do dostatečného množství velmi teplé (ne horké) vody, které bude stačit na ponoření ortodontické pomůcky.
2. Namáchejte 3-5 minut. Pro dosažení lepšího výsledku dočistěte ortodontickou pomůcku roztokem za pomoci měkkého zubního kartáčku. Zbylý roztok po použití ihned vylejte.
3. Pomůcku dobře opláchněte tekoucí vodou.

Složení:

Sodium bicarbonate
Citric acid
Potassium caroate (potassium monopersulfate)
Sodium carbonate
Sodium carbonate peroxide
TAED
Sodium benzoate
PEG-180
Sodium lauryl sulfate
VP/VA copolymer
Aroma
Subtilisin
Cellulose gum
Sodium nitrite
CI 42090
CI 73015

Bezpečnostní varování:

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte tablety do úst ani vzniklým roztokem ústa nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Při manipulaci s tabletami nebo roztokem se nedotýkejte úst ani očí. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou ze složek. Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob, které by mohly tablety nebo roztok náhodně požit. **PO POŽITÍ:** Okamžitě kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. **PŘI PODRÁŽDĚNÍ:** Přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **VAROVÁNÍ:** Zdraví škodlivé v případě požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po použití zlikvidujte obsah do domácího odpadu. Obsahuje MÁTOVÝ OLEJ a SUBTILISIN, které mohou způsobovat alergickou reakci.

EAN: 5054563108333
Obj. číslo: 900001
Výrobce: Haleon
Značka: Corega
Hmotnost: 0,2 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/corega-pro-cleanser-orthodontics-cistici-tablety-30-ks>