



Detail produktu

Alpa dent pro čištění umělého chrupu, 150 g

Alpa Dent obsahuje **enzymatické přísady**, které zabezpečí odstranění **zbytků potravy**. Další složkou je **látka s bělicími účinky** pro dobrý vzhled umělého chrupu.

Použití Alpa Dent čištění umělého chrupu:

- Ve sklenici vody rozpusťte za míchání lžičku přípravku.
- Chrup očistěte pod tekoucí vodou a ponořte do roztoku. Nechte působit přes noc.
- Ráno chrup důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

Složení:

Přípravek obsahuje enzymatické přísady a látku s bělicími účinky. Hydrogenuhličitan sodný, Trifosforečnan pentasodný, Disfosforečnan tetrasodný, Peroxometaboritan sodný/perboritan sodný, Chlorid sodný, Uhličitan sodný, Parfum Aroma - Uhličitan sodný seskviperoxyhydrát, Natrium-hydroxyalkan(C14-C16)sulfonáty a natrium-alken (C14-C16)sulfonáty, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Alcohols, C12-15, 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethylsulfát sodný, Subtilisin.

Upozornění:

Nevkládejte přípravek do úst. Nevyplachujte ústa roztokem.

EAN:	8594001770090
Obj. číslo:	900030
Výrobce:	ALPA a.s.
Značka:	Alpa
Hmotnost	0,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/alpa-dent-pro-cistení-umělého-chrupu-v-prasku-150-g